

Alnanogel

hydroaktívny chladivý obväz

pre liečbu symptómov atopickej dermatitídy

lepší ako mamino pofúkanie



ALNANOGE

prerušuje bludný kruh


svrbenie - škrabance - zápal - svrbenie

ALNANOGE

zvlhčuje vysušenú pokožku

ALNANOGE

potláča zápalový proces

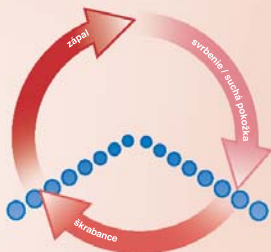

Zloženie
s hydrokoloidným
kalciumalginátom
upokojuje pokožku

chladenie / zvlhčovanie

 QuadraCare

Návod na použitie

KROK 1: PRÍPRAVA POKOŽKY

Ošetrované časti pokožky musia byť čisté a bez zvyškov krémov.

KROK 2: VÝBER OBVÄZU

- pre použitie u detí na zápästí, lakti, ruke a inde doporučujeme rozmer 6 cm x 3 m, u dospelých na rovnakých miestach rozmer 8 cm x 3 m
- u detí je vhodné na nohách, ako napr. na kolene, členku, chodidle a pod. rozmer 8 cm x 3 m, u malých detí (do 4 rokov) je vhodný rozmer 6 cm x 3 m

KROK 3: POUŽITIE OBVÄZU

Obväz sa špirálovite voľne ovinie okolo lakťa, zápästia, členka, končatiny atď. Obväz navinutý v 3 až 4 vrstvách zaistí chladivý efekt po dobu 3 až 5 hodín. Pre predĺženie chladivého efektu naneste vodu formou spreja na povrch obväzu. Pre použitie u detí je postačujúce navinúť polovicu dĺžky obväzu.

KROK 4: FIXÁCIA HYDRATAČNÉHO OBVÄZU

Vlhký chladivý obväz prekryte ďalšou vrstvou bežného obväzu alebo textilnej látky, aby sa zamedzilo priľnutiu chladivého obväzu k šatstvu. Nepoužívajte viac ako 2 vrstvy obväzu na chladivom krytí, v opačnom prípade sa blokuje odparovanie vody a znižuje chladivý účinok.

KROK 5: BEZBOLESTNÉ ODSTRÁNENIE OBVÄZU

Pokiaľ je chladivý obväz suchý a bez účinku, odstráni sa zvinutím od konca. Obväz sa ľahko sníma, pokiaľ tomu tak nie je, navlhčením sa dá zaistiť bezbolestné odstránenie z pokožky.

KROK 6: KONEČNÉ OŠETRENIE

Chladivý obväz po odstránení môže na pokožke zanechať vrstvu hydrokoloidu a alginátu. Táto vrstva môže byť ponechaná na pokožke ako ochranná vrstva, alebo odstránená umytím vodou.

VÝROBCA:

ALEGRO medical Christiane Jacob e. K.

• Fabrikstraße 51 • D-66424 Homburg

ZASTÚPENIE V SR:

QuadraCare, spol. s r.o. • Haškova 22 • 974 11 Banská Bystrica

Tel.: 0903 50 23 50, **mail:** info@quadracare.eu, **www.quadracare.eu**